

Aesculap® Isis & Vega

Ihr zuverlässiger Partner in der Praxis!



B. Braun Vet Care


Aesculap® Isis und Vega

Produkt-Vorteile


Handlich



Leise

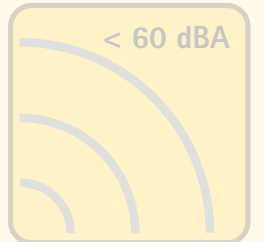

Wartungsarm

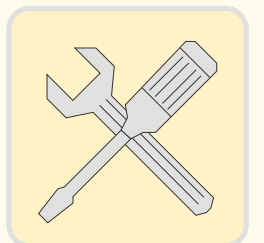


Made in Germany




Aesculap® Isis und Vega

GT420 Isis

Antrieb	DC Motor ca. 5700 1/min
Spannung	220-240 V 50/60 Hz
Akku-Ladezeit	ca. 60 Min
Betriebsdauer	bis zu 40 Min
Schneidsatz	Aesculap Spezial
Schnittlänge	ca. 1,5 mm
Schnittbreite	24 mm
Gewicht	ca. 120 g
Ladeanzeige	Ladeanzeige in Ladestation
Lieferumfang	1 Aufsteckkamm, Bürste, Öl, Ladestation mit Werkzeug, Schermaschine, Gebrauchs- anweisung
Lautstärke	< 60 dBA

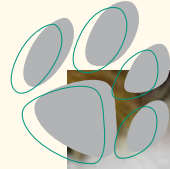

Inzision/Biopsie

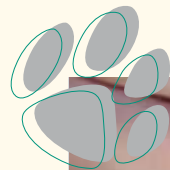

Schwer zugängliche
Bereiche



...für die professionelle „Vorbereitung“!

GT410 Vega

Vorbereitung Ultraschall



Venenpunktion Pferd



Antrieb	DC Motor ca. 5700 1/min
Spannung	230 V 50 Hz
Akku-Ladezeit	ca. 60 Min Schnellladung
Betriebsdauer	bis zu 100 Min.
Schneidsatz	Aesculap Spezial
Schnittlänge	3-fach verstellbar 0,5; 1,5 und 2,5 mm
Schnittbreite	40 mm
Gewicht	<250 g
Ladeanzeige	Direktanzeige auf Gerät
Lieferumfang	5 Aufsteckkäbme, Bürste, Öl, Ladestation, Schermaschine, Gebrauchsanweisung
Lautstärke	< 60 dBA



Pflegehinweise



Entfernen Scherkopf Vega

Scherkopf seitlich halten und mit Daumen mittig aus der Maschine drücken. Zum Einsetzen die beiden unteren Rastnasen in das Gehäuse einführen und Scherkopf einklappen.



Reinigung Scherkopf

Scherkopf mit leichten Bürstenbewegungen reinigen und Haarreste entfernen.



Ölen Scherkopf

Nach jeder Reinigung ist der Scherkopf zu ölen. Mit beigefügtem Öl (GT604) einen Tropfen mittig und je einen seitlich auf dem Scherkopf aufbringen.



Entfernen Scherkopf Isis

Inbusschlüssel aus der Unterseite der Ladestation entnehmen und Schraube lösen. Scherkopf abnehmen. Reinigung und Ölen analog wie oben beschrieben. Scherkopf mit Rastung einsetzen und Schraube eindrehen.

Hinweis:
Blut, Eiter und Wundsekret können den Scherkopf verkleben. Nach jeder Anwendung den Scherkopf reinigen und ölen.

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Fax +49 (0) 74 61 715 12 | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ ist eine eingetragene Marke der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

V08401

1012/1.0/2