



Handlich
Leise
Wartungsarm
Made in Germany



AESCULAP® VEGA
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IN DER PRAXIS!

AESCULAP® VEGA GT410

Die kabellose Schermaschine als ideales Produkt für kleinflächige Partien in der Veterinärschur, wie z. B. Rücken, Hals, Bauch, Kopf und Gesicht.

- sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Karbonstahl)
- liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form
- geringes Gewicht von nur 250 g inkl. Akku und Scherkopf
- arbeitet sehr leise und ohne Vibrationen
- kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden
- 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm)

TECHNISCHE DATEN

SCHERKOPFSYSTEM	Aesculap Spezial
ANTRIEB	DC Motor, ca. 4.800 Hübe/min
AKKU-TECHNOLOGIE	800 mAh, Lithium-Ionen
GEWICHT	ca. 250 g (inkl. Akku und Scherkopf)
SCHALLDRUCKPEGEL	ca. 60 dB
LAUFZEIT	ca. 100 min
LADEZEIT	ca. 60 min
SCHNITTBREITE	40 mm
SCHNITTLÄNGE	3-fach verstellbar: 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
LIEFERUMFANG	1 Vega Akkuschermaschine (GT410) + 1 Scherkopf (GT606) + 5 Aufsteckkämme + 1 Bürste + 1 Ladestation + 1 Aesculap Öl + 1 Gebrauchsanweisung



Vorbereitung Ultraschall



Venenpunktion Pferd

PFLEGEHINWEISE



Entfernen Scherkopf
Scherkopf seitlich halten und mit Daumen mittig aus der Maschine drücken. Zum Einsetzen die beiden unteren Rastnasen in das Gehäuse einführen und Scherkopf einklappen.



Reinigung Scherkopf
Scherkopf mit leichten Bürstenbewegungen reinigen und Haarreste entfernen.



Ölen Scherkopf
Nach jeder Reinigung ist der Scherkopf zu ölen. Mit beigefügtem Öl (GT604) einen Tropfen mittig und je einen seitlich auf dem Scherkopf aufbringen.

Hinweis:
Blut, Eiter und Wundsekret können den Scherkopf verkleben. Nach jeder Anwendung den Scherkopf reinigen und ölen.

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT410	Akkuschermaschine Vega	1/10	229,00
GT606	Scherkopf für GT410	1/160	34,99

AESCULAP® – a B. Braun brand

Albert Kerbl GmbH | Felizenzell 9 | 84428 Buchbach | Deutschland | schermaschinen@kerbl.de | www.kerbl.de